

URGOTUL DUO Ag



Inscription à marque
ASR IV*

Interface antibactérienne lipido-colloïde
absorbante, non adhésive
imprégnée de Sel d'Argent

Urgotul Duo Ag

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE	
			Nombre UCD	Nombre boîtes
3299	Standard : 10 x 12 cm	16	256	16
3303	Grand : 15 x 20 cm	16	224	14

**Traitement séquentiel de quatre semaines des ulcères de jambe à caractère inflammatoire, ayant au moins 3 des 5 signes cliniques suivants : douleur entre deux changements de pansement, érythème péri-lésionnel, œdème, plaie malodorante, exsudat abondant.*



URGOTUL DUO Ag



DESCRIPTION

- Interface lipido-colloïde non adhésive imprégnée de Sel d'Argent associée à une compresse protectrice et absorbante.

COMPOSITION : URGOTUL DUO Ag est un pansement interface imprégné de Sel d'Argent issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires Urgo.

URGOTUL DUO Ag est un pansement non adhésif, non occlusif, non adhérent à la plaie, composé d'une trame en polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes (Carboxyméthylcellulose), de vaseline et de sel d'argent, associée à une compresse protectrice et absorbante en non-tissée.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

PROPRIETES

- La spécificité de la TLC d'URGOTUL DUO Ag réside dans la présence d'une matrice polymérique qui assure la cohésion des particules hydrocolloïdes et de la vaseline sur une trame polyester. Au contact des exsudats, les particules hydrocolloïdes (CMC) se gélifient et forment un film lipido-colloïdal de contact avec la plaie.
- Les sels d'Argent d'URGOTUL DUO Ag libèrent progressivement les ions Argent au contact des exsudats pour une activité anti-bactérienne de contact capable de diminuer la charge bactérienne locale des plaies présentant des signes inflammatoires locaux évocateurs de colonisation bactérienne importante. L'ion Argent présente un large spectre d'action anti-microbien incluant les bactéries Gram négatif, Gram positif et certaines moisissures et levures. Il est particulièrement efficace sur les germes les plus souvent responsables de l'infection des plaies : Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus Méti-R, Pseudomonas aeruginosa (bacille pyocyanique).
- URGOTUL DUO Ag a démontré une activité anti-bactérienne in vitro jusqu'à 7 jours.
- L'activité anti-bactérienne d'URGOTUL DUO Ag permet en outre une réduction de l'odeur causée par certains micro-organismes présents dans la plaie.
- La compresse d'URGOTUL DUO Ag confère au pansement une propriété protectrice et absorbante. Ainsi, URGOTUL DUO Ag permet une facilitation des soins et un meilleur confort pour le patient car il rend inutile l'addition d'un pansement secondaire sur la plaie (compresse ou gaze stérile).
- Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, l'interface d'URGOTUL DUO Ag n'adhère pas à la plaie : les renouvellements de pansements sont donc indolores pour le patient et atraumatiques pour la plaie.
- Grâce à sa faible épaisseur et à sa flexibilité, URGOTUL DUO Ag est très conformable et épouse toute localisation anatomique difficile.

INDICATIONS

- URGOTUL DUO Ag est indiqué dans le traitement local des plaies faiblement exsudatives présentant un risque d'infection : plaies chroniques (ulcères, escarres), plaies aiguës (brûlures du 2e degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies chirurgicales, etc...). En raison de son caractère non adhésif, URGOTUL DUO Ag est recommandé dans le traitement des plaies présentant une peau péri-lésionnelle fragilisée.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique avant l'application d'URGOTUL DUO Ag.
- Retirer les ailettes de protection d'URGOTUL DUO Ag.
- Appliquer URGOTUL DUO Ag directement sur la plaie, en posant le côté de la trame en contact avec celle-ci.
- URGOTUL DUO Ag peut être prédécoupé si nécessaire à l'aide de ciseaux stériles, afin de l'adapter à la taille de la plaie.
- URGOTUL DUO Ag ne doit pas être plié.
- Maintenir URGOTUL DUO Ag avec une bande extensible ou un sparadrap multi-extensible ou filet tubulaire.
- Poser une bande de compression si nécessaire.
- Les renouvellements d'URGOTUL DUO Ag seront effectués tous les 1 à 3 jours en fonction de la plaie traitée et de son évolution clinique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Le traitement par URGOTUL DUO Ag se fera exclusivement sous surveillance du personnel soignant.
- Il est important de poser le pansement URGOTUL DUO Ag côté interface TLC ; vous devez donc vérifier que vous appliquez bien l'interface TLC sur la plaie et non le côté compresse.
- Ne pas plier le pansement.
- L'utilisation conjointe d'autres traitements est déconseillée.
- Les professionnels de santé doivent prendre en compte que les données concernant l'utilisation prolongée et répétée d'un pansement à l'argent, particulièrement chez l'enfant et le nouveau-né sont peu documentées.
- En l'absence de données cliniques spécifiques, l'utilisation d'URGOTUL DUO Ag pendant la grossesse et l'allaitement ainsi que sur le nouveau-né et le prématuré est déconseillée.
- Éviter le contact du pansement avec les électrodes ou gels conducteurs pendant les mesures effectuées à l'aide d'appareils électroniques (EEG, ECG, etc...).
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Ne pas restériliser le pansement.
- Stocker URGOTUL DUO Ag à plat, à l'abri de la chaleur et de la lumière, à une température inférieure à 25°C.

CONTRE-INDICATIONS :

- Sensibilisation connue à l'argent et autres composants du pansement.
- Ne pas laisser le pansement en place sur le patient au cours d'examen par Résonance Magnétique Nucléaire (IRM).

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0086.

Inscrit sur Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

Tarif = Prix Limite de Vente.

Remboursé Sécurité Sociale à 60 %*.

